


ANLEITUNG

Batterie- und Elektrodenwechsel ZOLL AED 3

1

Die alte Elektrode am Stecker fest ziehen und entfernen. Die neue Elektrode beim Anschluss einstecken.


Die Batterie befindet sich auf der Rückseite. Sie ist per Klickverbindung am Gerät befestigt.

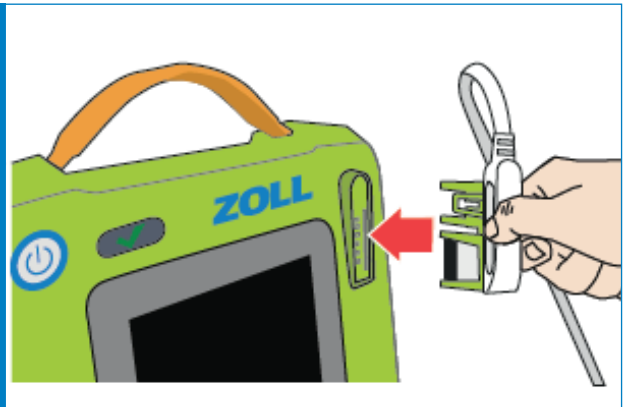

2


Batterie entfernen, 30 Sekunden warten, neue Batterie einsetzen und fest eindrücken, so dass die beiden Klickverbindungen oben und unten einrasten.

Das Gerät wird sich automatisch einschalten um einen Selbsttest durchzuführen.

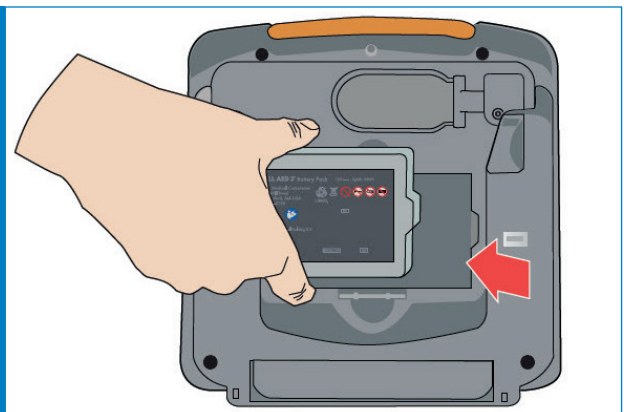

3

Nun die Elektrode auf der Rückseite des AEDs im Elektrodenfach verstauen.

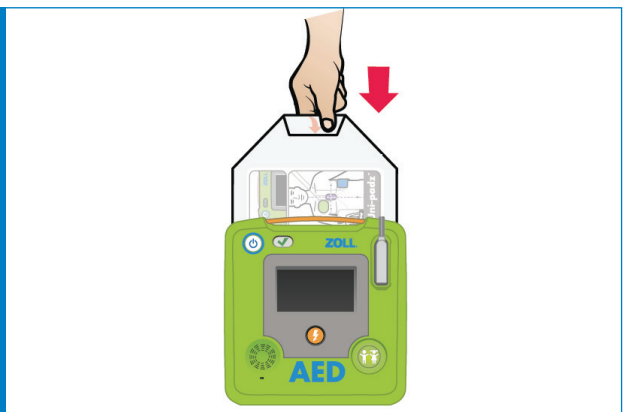

4

Warten, bis das Gerät den automatischen Selbsttest durchgeführt hat. Das dauert ca. 60 Sekunden. Nach dem Selbsttest schaltet sich das Gerät wieder aus.

Danach mittels der Statusanzeige kontrollieren, ob das Gerät einsatzbereit ist.

