

Montageanleitung

Einsatz-Tragtasche ZOLL-MOD zu ZOLL X Series

Abdeckkappen am Griff mit spitzem Werkzeug lösen und die vier Schrauben am Griff lösen (links und rechts), um den Griff vom Gerät zu trennen.

1



Ösen am Griff befestigen (links und rechts)

2



Das kurze Gurtband an der Rückseite der rechten Tragetasche an Rückhalteplatte festschrauben.

3



Montageanleitung

Einsatz-Tragtasche ZOLL-MOD zu ZOLL X Series

Die Ösen der Tragetaschen am Griff befestigen und den Griff wieder an das Gerät schrauben.

☞ Darauf achten, dass kein Ösenband eingeklemmt wird.

Abdeckkappen wieder am Griff befestigen.

4



Distanzhülsen auf die Gewindebuchsen an der Rückseite des Gerätes platzieren (2x).

Metallbügel der linken Tragetasche so ausrichten, dass das Loch im Metallbügel über der Gewindebuchse des Gerätes positioniert ist.

5



Rückhalteplatte positionieren und Stromstecker einstecken.

☞ Darauf achten, dass die Distanzhülsen nicht verschoben werden.

Zugentlastungsblech positionieren und die vier Schrauben inkl. Unterlagscheiben festschrauben.

6

