


Infusionspumpe – Kurzanleitung


Sperren des Touchscreens



Zum Sperren des Touchscreens wischen Sie von oben nach unten über den Touchscreen, und wählen Sie .

Entsperren des Touchscreens

Zum Entsperren des Touchscreens drücken Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Touchscreen, und schieben Sie den Schieberegler wie angewiesen.

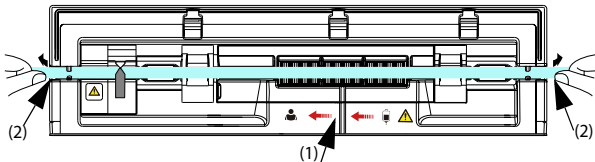


Infusionsset laden



1. Drücken Sie den Betriebsschalter , um die Pumpe einzuschalten.
2. Drücken Sie auf , um die Pumpenklappe zu öffnen.
3. Legen Sie die Infusionsleitung in den Schlitz. Achten Sie dabei darauf, dass sie nicht durchhängt, und folgen Sie dem Flow-Richtungsanzeiger (1). Achten Sie darauf, dass das Infusionsset gerade geführt und fest entlang den Schlauchkanalnuten (2) auf beiden Seiten des Gehäuses gedrückt wird.
4. Schließen Sie die Pumpenklappe.

Durchführen der Infusion

Führen Sie nach dem Laden eines Infusionssets die Infusion gemäß den folgenden Anweisungen durch:

1. Wählen Sie die Marke des Infusionssets aus, und stellen Sie die Infusionsparameter ein. Wählen Sie bei Bedarf das Medikament aus.
2. Spülen Sie die Infusionsleitung, und schließen Sie das Infusionsset am Patienten an.
3. Wählen Sie , um die Infusion zu starten.
4. Wählen Sie , um die Infusion zu stoppen.
5. Entnehmen Sie das Infusionsset. Drücken Sie den Betriebsschalter , um die Pumpe auszuschalten.

WARNUNG: Überprüfen Sie vor Beginn der Infusion, ob die Marke des Infusionssets richtig ausgewählt wurde.

Einstellen der Pumpe

Um die Pumpe einzustellen, wischen Sie auf dem Touchscreen von oben nach unten, und wählen Sie **Menu**.

- ◆ Wählen Sie **Allg. Option**, um den Schwellenwert für den Okklusionsdruck usw. einzustellen.
- ◆ Wählen Sie **Systemoptionen**, um die Alarmlautstärke, Bildschirmhelligkeit usw. einzustellen.

Alarmstatus-Symbole




: Akustische Alarmtöne sind auf „Pause“ gesetzt.

: Alarme wurden quittiert, und der Alarm wurde zurückgesetzt.

: Alarme wurden quittiert, und der Erinnerungston wurde ausgegeben.

Pausieren von Alarmtönen

Um in den Status „Audio-Pause“ zu wechseln, haben Sie folgende Möglichkeiten:

◆ Wählen Sie  auf dem Alarmbildschirm.

◆ Wischen Sie von oben nach unten über den Touchscreen, und wählen Sie .

Zurücksetzen von Alarmen

Wenn ein Alarm auftritt, drücken Sie , um ihn zu quittieren und zurückzusetzen.

Maßnahmen bei Alarmen

Alarm	Was ist zu tun?
Luft in Leitung	◆ Trennen Sie den Patienten von der Pumpe, und entlüften/spülen Sie die Leitung. ◆ Überprüfen Sie, ob die Einstellung für die Begrenzung einzelner Luftblasen korrekt ist.
Akkumulierte Luft	◆ Trennen Sie den Patienten von der Pumpe, und entlüften/spülen Sie die Leitung. ◆ Überprüfen Sie, ob die Einstellung für den Grenzwert für Luftblasenansammlungen korrekt sind.
Verläng.kabel entfernt	Überprüfen Sie den Tropfsensor-Anschluss, oder ersetzen Sie den Tropfsensor.
Upstream-Okklusion	Überprüfen Sie, ob das Infusionsset durchgängig ist.
Downstream-Okklusion	◆ Überprüfen Sie, ob das Infusionsset durchgängig ist. ◆ Überprüfen Sie, ob die Einstellung des Druckgrenzwerts korrekt ist.
Infusionsset ausgekuppelt	Schließen Sie die Rollenklemme, und laden Sie das Infusionsset neu.
Infusionsset-Fehler	Schließen Sie die Rollenklemme, und laden Sie das Infusionsset neu.

WARNUNG: Überprüfen Sie beim Auftreten eines Alarms den Status der Pumpe, und gehen Sie dem Alarm so schnell wie möglich nach. Wenn die Alarme nicht mit der tatsächlichen Situation übereinstimmen, wenden Sie sich an das Wartungspersonal. Maßnahmen für andere Alarme finden Sie im Bedienungshandbuch.



046-020674-00(1.0)